


자동심장충격기 사용법 (이미지 출처 : 나눔테크, 대한심폐소생협회)

1) 심장충격기를 보관함에서 꺼냅니다.




*문이 잠겨져 있으면, 투명 아크릴 판을 깨고 심장충격기를 꺼내어 사용합니다.

2) 사용자는 환자와 적당히 떨어져 앉고 심장충격기의 전원을 켭니다.

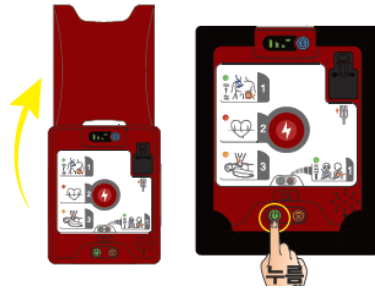


*커버를 열고 녹색 전원 버튼을 길게 누릅니다.

3) 오른쪽 쇄골아래, 왼쪽 옆구리에 각각 패드를 부착합니다.

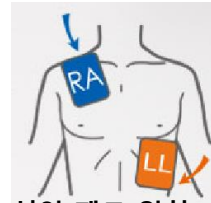

성인 패드 위치

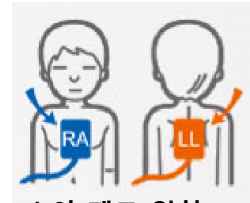

소아 패드 위치

* 7세 이하 소아 적용 시, 심장충격기를 소아 전환 버튼을 누른 후 소아 패드 부착 위치에 패드를 각각 부착합니다.

4) 패드를 부착 후, "멀리 떨어지세요"라고 외치고, 환자에게 접촉하지 않게 합니다.



5) 또는 7) "흉부압박을 시행하세요" 또는 "심폐소생술 하세요" 라는 멘트가 방송됩니다.



빈맥 또는 심실세동이 아닐 때

즉시, 심폐소생술을 실시합니다.

5) "전기충격 준비중입니다" 또는 "제세동 필요합니다"라는 멘트가 방송됩니다.

6) 충전 완료 후, "깜박이는 버튼을 누르면 전기충격이 가해집니다" 또는 "전기충격 버튼을 누르세요" 라는 멘트가 방송되면,



충전 중일 때, 가슴압박을 시행 합니다.



즉시, 가슴압박을 멈추고 "멀리 떨어지세요"라고 외친 후, 주변사람들이 떨어져 있는 것을 확인 후, 전기 충격버튼을 누릅니다.

